

# Scheda tecnica Filtrante Facciale **FFP3**

Item MZC-1896 / Art.97008

## Descrizione :

FILTRANTE FACCIALE FFP3 NR EN149:2001+A1:2009

## Confezione

1 Pezzo in Bustina in Italiano EAN 4894195970081

Box in Italiano da 20Pezzi EAN 4894195970097

Imballo master misura 48x41x51cm. GW: 8,5Kgs.

Quantità 480Pezzi (24Box)



**CE 0370**

## Istruzioni per l'uso :

**Prestazioni:** Facciale Filtrante monouso qui descritto appartiene alla classe di protezione FFP3 secondo la norma EN149:2001+A1:2009.

**Applicazioni:** Protezione contro aerosol solidi e liquidi (per es. nebbie oleose) non tossici, di bassa/media tossicità in concentrazioni fino al Valore di Limite di Soglia TLV 12.

**Descrizione:** Mascherina **FFP3 con 5 Strati di protezione. 2 Elastici Nucali regolabili.** Stringinaso modellabile.

**Durata:** I facciali filtranti (UNI EN 149) devono essere impiegati solamente per un turno lavorativo e comunque devono essere sostituiti immediatamente con una nuova non appena è umida e qualora la respirazione diventasse difficoltosa a causa della saturazione del materiale filtrante.

**Avvertenze:** Prima di indossare un dispositivo di protezione individuale, di seguito chiamato DPI, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone. Verificate che il dispositivo sia integro e pulito. La mancata osservanza delle prescrizioni può indurre ad un uso errato del DPI e causare malattie e morte.

Prima dell'utilizzo del DPI, consultare una persona addestrata in Igiene Industriale o personale esperto in Sicurezza Occupazionale per determinare l'idoneità o meno all'utilizzo.

Questo dispositivo non fornisce ossigeno. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati con sufficiente tenore di ossigeno per sostenere la vita. I limiti riguardanti la presenza di ossigeno in un dato contesto per l'impiego di queste mascherine possono variare da nazione a nazione, si invita a far riferimento ai parametri definiti nella nazione d'uso. Il fabbricante sconsiglia comunque un impiego in ambienti con concentrazioni di ossigeno inferiori al 19,5%. Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute o la vita. Non utilizzare in atmosfera dove esiste pericolo d'esplosione. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se (A) la respirazione diventa difficoltosa, (B) si avvertono senso di angoscia o vertigini. Peli di barba, ed affezioni respiratore possono ridurre l'efficienza di questo facciale filtrante. Non modificare e alterare in nessun modo il facciale filtrante se danneggiato buttarlo. Solo monouso. Non richiede manutenzione.

**Rimozione e smaltimento del DPI:** Con una mano afferrare gli elastici e portarli davanti al viso mentre con l'altra mano afferrare e trattenere il dispositivo allontanandolo poi dal volto. Eliminare il facciale e lavarsi accuratamente le mani. Attenzione: Tutti i dispositivi monouso devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti.

Respiratore di protezione contro le particelle solide e liquide non deve essere utilizzata per oltre un giorno lavorativo -.

Efficienza filtrante totale al 99%.

## Limiti d'uso :

Per portare il respiratore l'utente deve ricevere la formazione necessaria e deve aver letto il manuale per l'uso prima di utilizzarlo. Utilizzare il respiratore in zone aerate bene, ossigenate (> a 19.5%) e che non contengono atmosfere esplosive. Il respiratore deve essere perfettamente posizionato per garantire il livello di protezione previsto. Non utilizzare se i peli del viso (barba, basette) impediscono l'impermeabilità del respiratore e provocano una perdita. Andare via immediatamente se la respirazione diventa difficile e/o se si provano degli stordimenti o malesseri.

Il non rispetto di queste istruzioni per l'uso può provocare danni alla salute dell'utente ed esporlo a seri traumi, o mettere la sua vita in pericolo. Questa maschera non deve essere utilizzata in più di un solo posto di lavoro. Utilizzare soltanto nel suo campo d'applicazione definito nelle istruzioni. Il contatto con la pelle può provocare delle reazioni allergiche alle persone sensibili. In questo caso, lasciare la zona a rischio, togliere il respiratore e consultare un medico.

## Istruzioni di stoccaggio :

Stoccare al fresco, all'asciutto, al riparo da gelo e luce, nella sua confezione d'origine.

Stoccare a temperatura compresa tra -0° e +50°C con un'umidità massima di <50%.

Il codice identificativo del modello **FFP3 NR / MZC-1896**

**LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO**

## APPLICAZIONI : protezione contro polveri, fumi e nebbie di liquidi (aerosol) inalabili.

Come Indossare la mascherina:

1. Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.
2. Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.
3. Posizionare l'elastico superiore sulla nuca. Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.
4. Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.
5. La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare in ambienti di rischio potenziale. Prova di tenuta per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.



## Struttura Filtrante FFP3 e costituita da 5 seguenti strati:



