

Scheda tecnica Filtrante Facciale FFP2 EN149

Item LG-DFM-01 / Art.97188

CE 2163

Descrizione :

FILTRANTE FACCIALE FFP2 EN149:2001+A1:2009

Confezione

1 Pezzo in Bustina in Italiano EAN : 8055200100120

Box in Italiano da 50Pezzi EAN 8055200100144

Imballo master da 900Pezzi (18Box).



Descrittivo:

Mascherina filtrante FFP2 in tessuto non tessuto, Stringinaso regolabile.

Istruzioni per l'uso :

Prestazioni: Facciale Filtrante monouso qui descritto appartiene alla classe di protezione FFP2 secondo la norma EN149:2001+A1:2009.

Applicazioni: Protezione contro aerosol solidi e liquidi (per es. nebbie oleose) non tossici, di bassa/media tossicità in concentrazioni fino al Valore di Limite di Soglia TLV 12.

Descrizione: Mascherina filtrante FFP2 in tessuto non tessuto, diverse fasce regolabili. Stringinaso regolabile.

Durata: I facciali filtranti (UNI EN 149) devono essere impiegati solamente per un turno lavorativo e comunque devono essere sostituiti immediatamente con una nuova non appena è umida e qualora la respirazione diventasse difficoltosa a causa della saturazione del materiale filtrante.

Avvertenze: Prima di indossare un dispositivo di protezione individuale, di seguito chiamato DPI, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone. Verificate che il dispositivo sia integro e pulito. La mancata osservanza delle prescrizioni può indurre ad un uso errato del DPI e causare malattie e morte.

Prima dell'utilizzo del DPI, consultare una persona addestrata in Igiene Industriale o personale esperto in Sicurezza Occupazionale per determinare l'idoneità o meno all'utilizzo.

Questo dispositivo non fornisce ossigeno. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati con sufficiente tenore di ossigeno per sostenere la vita. I limiti riguardanti la presenza di ossigeno in un dato contesto per l'impiego di queste mascherine possono variare da nazione a nazione, si invita a far riferimento ai parametri definiti nella nazione d'uso. Il fabbricante sconsiglia comunque un impiego in ambienti con concentrazioni di ossigeno inferiori al 19,5%. Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute o la vita. Non utilizzare in atmosfera dove esiste pericolo d'esplosione. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se (A) la respirazione diventa difficoltosa, (B) si avvertono senso di angoscia o vertigini. Peli di barba, ed affezioni respiratore possono ridurre l'efficienza di questo facciale filtrante. Non modificare e alterare in nessun modo il facciale filtrante se danneggiato buttarlo. Solo monouso. Non richiede manutenzione.

Rimozione e smaltimento del DPI: Con una mano afferrare gli elastici e portarli davanti al viso mentre con l'altra mano afferrare e trattenere il dispositivo allontanandolo poi dal volto. Eliminare il facciale e lavarsi accuratamente le mani. Attenzione: Tutti i dispositivi monouso devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti.

Respiratore di protezione contro le particelle solide e liquide non deve essere utilizzata per oltre un giorno lavorativo -.

Efficienza filtrante totale > 95%.

Limiti d'uso :

Per portare il respiratore l'utente deve ricevere la formazione necessaria e deve aver letto il manuale per l'uso prima di utilizzarlo. Utilizzare il respiratore in zone aerate bene, ossigenate (> a 19.5%) e che non contengono atmosfere esplosive. Il respiratore deve essere perfettamente posizionato per garantire il livello di protezione previsto. Non utilizzare se i peli del viso (barba, basette) impediscono l'impermeabilità del respiratore e provocano una perdita. Andare via immediatamente se la respirazione diventa difficile e/o se si provano degli stordimenti o malesseri.

Il non rispetto di queste istruzioni per l'uso può provocare danni alla salute dell'utente ed esporlo a seri traumi, o mettere la sua vita in pericolo. Questa maschera non deve essere utilizzata in più di un solo posto di lavoro. Utilizzare soltanto nel suo campo d'applicazione definito nelle istruzioni. Il contatto con la pelle può provocare delle reazioni allergiche alle persone sensibili. In questo caso, lasciare la zona a rischio, togliere il respiratore e consultare un medico.


Istruzioni di stoccaggio :

Stoccare al fresco, all'asciutto, al riparo da gelo e luce, nella sua confezione d'origine.
Stoccare a temperatura compresa tra -30° e +40°C con un'umidità massima di <80%.

Il codice identificativo del modello **FFP2 NR / LG-DFM-01**
LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO


CE 2163

La struttura Filtrante FFP2 è costituita da 5 seguenti strati:

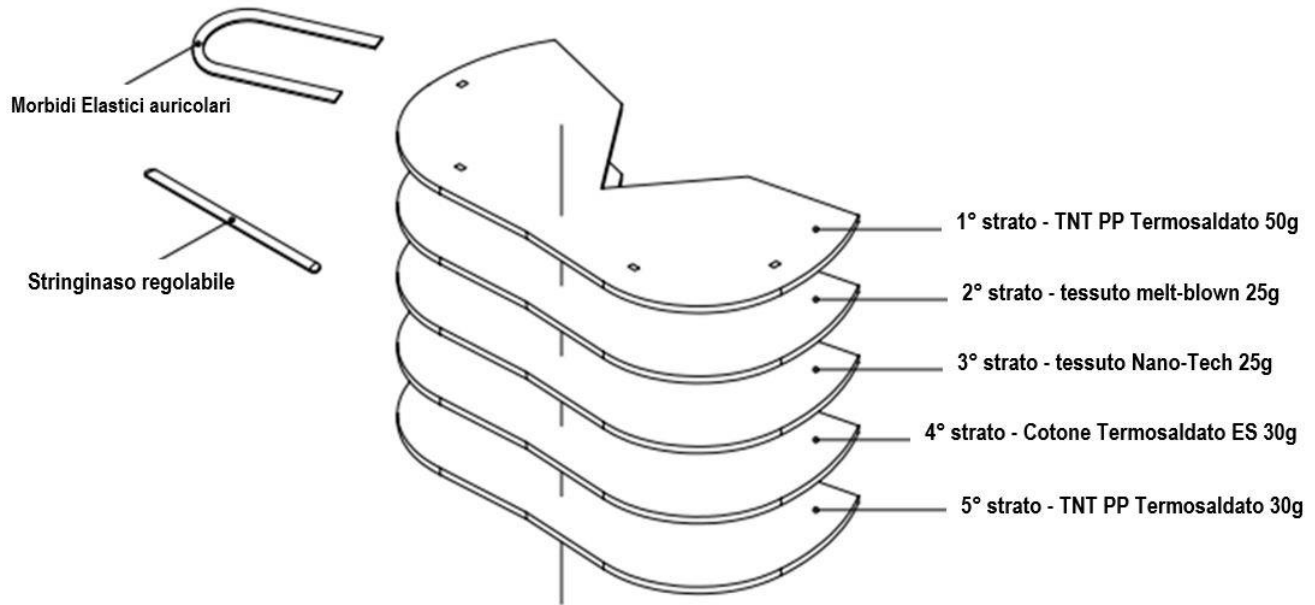

Dichiarazione di conformità UE

1. DPI: Semi maschera filtrante facciale FFP2 – LG-DFM-01
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:
Fabbricante: QUANZHOU LIGAO PROTECTIVE PRODUCT MANUFACTURER CO., LTD
4/F, No. 221 Jitai Road Quanzhoueconomic and Technological Development Zone,
Fujian Province, P.R. China
Importatore: RICA TRADE SRL - Lungotevere dei Mellini,44 scala Valadier 2/B 00193
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione:
Semi maschera filtrante facciale FFP2 NR LG-DFM-01
Codice importatore: 97188
Lotto n. 0321

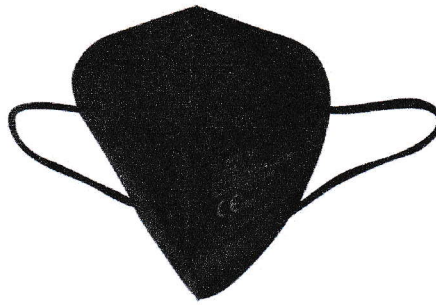

5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: Regolamento (UE) 2016/425 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della norma, o alle altre specifiche tecniche, compresa la data della specifica, in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
EN149:2001 + A1:2009
7. L'organismo notificato **Universal UygunlukDegerlendirmeHizmetleri ve Tic. A.Ş. (n. 2163)** ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n. 2163-PPE-740.
8. Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all'allegato VII sotto la sorveglianza dell'organismo notificato **Universal UygunlukDegerlendirmeHizmetleri ve Tic. A.Ş. (n. 2163)**.

Firmato a nome e per conto di QUANZHOU LIGAO PROTECTIVE PRODUCT
MANUFACTURER CO., LTD

Luogo e data del rilascio: 17.03.2021

Nome e cognome: Wong Hai bin

Funzione: General manager

Firma: 

